

Gebrauchsanweisung

Hya-Ophtal® sine

Liebe Patientin, lieber Patient,

mit Hya-Ophtal® sine haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das Ihre Augenoberfläche befeuchtet, angenehm erfrischt und beruhigt und somit die subjektiven Symptome einer Benetzungsstörung lang anhaltend lindert. Hya-Ophtal® sine enthält Hyaluronsäure, die als natürliches Polymer auch in Strukturen des menschlichen Auges und des natürlichen Tränenfilms vorkommt. Somit ist Hya-Ophtal® sine gut verträglich.

Hya-Ophtal® sine eignet sich zur Benetzung und Nachbenetzung sowohl weicher als auch harter Kontaktlinsen und verbessert spürbar den Tragekomfort Ihrer Kontaktlinsen über den ganzen Tag.

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig – sie enthält wichtige Informationen zur Anwendung dieses Medizinproduktes. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder gern auch an uns.

Dr. Winzer Pharma wünscht Ihnen und Ihren Augen alles Gute!

Welche Darreichungsformen sind erhältlich?

Hya-Ophtal® sine gibt es in Packungen mit 20 oder 60 Eindosis-Behältnissen mit je 0,5 ml Lösung. Die Lösung enthält 0,2%ige Hyaluronsäure und ist konservierungsmittelfrei.

Wann sollten Sie Hya-Ophtal® sine benutzen?

Hya-Ophtal® sine erfrischt und beruhigt Ihre Augen. Es verbessert die Befeuchtung der Augenoberfläche bei Trockenheitsgefühl, Brennen oder Müdigkeit. Diese Symptome werden oftmals durch z. B. langes Fernsehen oder Bildschirmarbeit, Heizungsluft, Klimaanlage, Zigarettenrauch oder Zugluft verursacht.

Hya-Ophtal® sine ist auch zur Benetzung und Nachbenetzung während des Tragens von weichen und harten Kontaktlinsen sehr gut geeignet.

Wie wenden Sie Hya-Ophtal® sine an?

Die einfache und problemlose Anwendung entnehmen Sie bitte der Grafik. Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Eindosis-Behältnisse beim Tropfen möglichst senkrecht halten.


1.



2.



3.

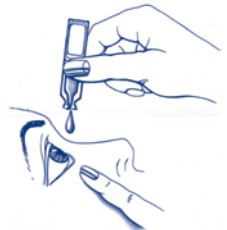

Bitte vermeiden Sie eine Berührung des Eindosis-Behältnisses mit dem Auge und der Kontaktlinse, um eine mögliche Verletzung bzw. Beschädigung zu vermeiden.

Was ist bei der Anwendung von Hya-Ophtal® sine zu beachten?

Hya-Ophtal® sine enthält zur besseren Verträglichkeit keine Konservierungsmittel. Das Eindosis-Behältnis sollte nach dem Gebrauch nicht aufbewahrt, sondern entsorgt werden. Bitte verwenden Sie keine beschädigten Eindosis-Behältnisse, da der Inhalt dann nicht mehr steril ist. Verwenden Sie Hya-Ophtal® sine nicht mehr nach Ablauf des Verfalldatums.

In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfindlichkeitsreaktionen kommen. Das Präparat sollte dann nicht weiter angewendet werden.

Hersteller:

Dr. Robert Winzer Pharma GmbH

Brunsbütteler Damm 165-173

D-13581 Berlin

CE 0483

STERILE A



Nicht verwenden, wenn Eindosis-Behältnis beschädigt ist.