

UrgoSuperSuperabsorber

DE - SUPERABSORBIERENDE WUNDAUFLAGE, STERIL

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoSuperSuperabsorber ist eine sterile, superabsorbierende Wundauflage für stark bis mäßig exsudierende Wunden. Die der Wunde zugewandte weiße Oberfläche (Wundkontaktschicht) besteht aus einem perforierten Polyethylenfilm, der Saugkörper aus einem Cellulose-Natriumpolyacrylat-Kern und die blaue Rückseite aus einem hydrophoben Polypropylen-Vliesstoff.

INDIKATIONEN

Exsudierende Wunden wie Ulzera cruris, Druckulzera, Diabetische Fußulzera, oberflächliche Verbrennungen und andere Wunden mit starker bis mäßiger Exsudation.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

UrgoSuperSuperabsorber absorbiert und speichert das Exsudat im Verbandmaterial. Das Exsudat wird vertikal durch die Wundauflage aufgenommen und unter Gelbildung im Kern gespeichert, wodurch das Mazerationsrisiko an den Wundrändern minimiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrechterhalten wird. Die hydrophobe Rückseite minimiert ein Auslaufen des aufgenommenen Exsudats aus der Wundauflage und verhindert das Eindringen von Bakterien von außen in das Produkt. Die Wundkontaktschicht verhindert ein Verkleben der Wundauflage mit der Wunde und gewährleistet die Durchführung eines atraumatischen Verbandwechsels, wodurch sich **UrgoSuperSuperabsorber** als Primärverband eignet.

HINWEISE ZUR ANWENDUNG

UrgoSuperSuperabsorber sollte bei stark bis mäßig exsudierenden Wunden angewendet werden, bei denen es auf eine starke Absorption und wenige Verbandwechsel ankommt.

- Zu Beginn der Behandlung ist darauf zu achten, dass eine ausreichende Menge Wundexsudat vorhanden ist.
- Reinigen Sie die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll. Antiseptika auf der Basis von Octenidin (bis 0,1%) oder Polyhexanid (bis 0,2%) können zur Wundreinigung herangezogen werden. Werden andere Lösungen zur Wundreinigung verwendet, sollten diese durch Spülen mit steriler Kochsalzlösung oder einer der oben genannten Lösungen wieder entfernt werden, bevor **UrgoSuperSuperabsorber** appliziert wird.
- Trocknen Sie die Wundumgebung sorgfältig ab.
- Wählen Sie eine Größe von **UrgoSuperSuperabsorber** aus, die den Wundbereich abdeckt. Die Ränder des Saugkerns sollten die Wunde um mindestens 2 cm überlappen. Stellen Sie sicher, dass die Wundauflage mit der wundseitigen Oberfläche (weiße Seite) auf die Wunde aufgebracht wird. **UrgoSuperSuperabsorber** muss direkten Kontakt zum Wundgrund oder dem Primärverband haben.
- Fixieren Sie **UrgoSuperSuperabsorber**. **UrgoSuperSuperabsorber** sollte

entsprechend bewährter Verfahren zur Behandlung exsudierender Wunden regelmäßig überprüft werden.

- **UrgoSuperSuperabsorber** sollte gewechselt werden, bevor die Wundauflage gesättigt ist oder wenn der klinische Zustand der Wunde einen Verbandwechsel erfordert, spätestens jedoch nach 7 Tagen.
- **UrgoSuperSuperabsorber** kann sowohl als Primär- als auch als Sekundärwundauflage verwendet werden.
- **UrgoSuperSuperabsorber** kann auch unter einem Kompressionsverband getragen werden.
- Die verwendete Wundauflage als normalen Abfall behandeln. Kontaminierte Wundauflagen gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

UrgoSuperSuperabsorber nicht zuschneiden oder falten. Die Umhüllung des Saugkerns muss intakt bleiben.

Verwenden Sie **UrgoSuperSuperabsorber** nicht, wenn die sterile Verpackung beschädigt ist.

UrgoSuperSuperabsorber ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Nicht erneut sterilisieren, die Wundauflage kann nicht wiederverwendet werden. Eine Wiederverwendung kann Kreuzkontaminationen hervorrufen.

KONTRAINDIKATIONEN

UrgoSuperSuperabsorber darf nicht auf trockenen Wunden, Augen, Schleimhäuten oder Sehnen verwendet werden. **UrgoSuperSuperabsorber** darf nicht in Wundhöhlen verwendet werden, da die Wundauflage im Zuge der Absorption anschwillt.

UrgoSuperSuperabsorber darf nicht bei Personen mit bekannter Überempfindlichkeit gegenüber der Wundauflage oder einer ihrer Komponenten verwendet werden.

UrgoSuperSuperabsorber sollte nicht mit Salben und Cremes verwendet werden, da diese die Wundkontaktschicht verstopfen und somit die Wirkung des Produktes beeinträchtigen können. Produkte, die stark oxidierende Substanzen (wie Kaliumpermanganat oder Wasserstoffperoxid), aliphatische, aromatische oder halogenierte Kohlenwasserstoffe oder Fette enthalten, dürfen nicht zusammen mit **UrgoSuperSuperabsorber** verwendet werden, da diese das Produkt beschädigen könnten.

Zähflüssiges Wundexsudat wird im Allgemeinen langsam und nur bedingt absorbiert.