



DE

## **HYDROREINIGENDE ABSORBIERENDE TAMPONADE MIT STERILER APPLIKATIONSHILFE**

### **PRODUKTBESCHREIBUNG**

Die **UrgoClean** Tamponade ist eine Innovation der Laboratoires URGO in Form einer sterilen Vliestamponade aus hydroreinigenden, absorbierenden und kohäsiven Polyacrylatfasern.

Diese Innovation beruht darauf, die Polyacrylatfasern in einer parallel zur Wunde verlaufenden Ebene durch Thermostanzung strukturell miteinander zu verbinden. Dadurch erhält die **UrgoClean** Tamponade ihre spezifischen Eigenschaften:

- Absorption und Einschließen von fibrinösen Belägen
- Hohe Zugfestigkeit

### **WIRKMECHANISMUS**

In Kontakt mit dem Wundexsudat bilden die hydroreinigenden Polyacrylatfasern ein Gel, binden fibrinöse Beläge, absorbieren diese und leiten sie in die Faserstruktur ab (autolytische Wundreinigung).

### **EIGENSCHAFTEN**

- Absorption und Ableitung von fibrin- und bakterienhaltigen Belägen bei chronischen Wunden zur Förderung der Wundreinigung
- Absorption und Ableitung von Serumexsudaten bei Operationswunden
- Erleichterte Kontrolle schwacher Blutungen
- Entfernung der Tamponade in einem Stück dank der Zugfestigkeit der hydroreinigenden Fasern
- Atraumatisches und schmerzfreies Entfernen der Tamponade

### **INDIKATIONEN**

Die **UrgoClean** Tamponade ist unmittelbar ab der Reinigungsphase für exsudierende, tiefe und zerklüftete, chronische Wunden (Unterschenkelulzera, Druckulzera, Diabetische Fußulzera, unter anderem Malum perforans mit Geschwüren an der Fußsohle) und akute (traumatische) Wunden, postoperative Wunden sowie tumorbedingte Wunden geeignet.

## **HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG**

### **1 - Vorbereitung der Wunde:**

- Die Wunde nach dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Falls zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde (mit Ausnahme der kontraindizierten Antiseptika), ist die Wunde vor der Anwendung der **UrgoClean** Tamponade sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung zu spülen.
- Die Verwendung der **UrgoClean** Tamponade schließt eine mechanische Reinigung nicht aus, sofern diese notwendig ist.

### **2 - Einlegen der Tamponade in die Wunde:**

- Die Schutzfolie der sterilen Einzelverpackung öffnen.
  - Mit der sterilen Applikationshilfe gegebenenfalls die Tiefe der Wunde messen.
  - Die **UrgoClean** Tamponade lose in die Wunde legen, ohne zu festen Druck auszuüben.
- Die **UrgoClean** Tamponade kann bei Bedarf mit einer sterilen Schere in der Länge zugeschnitten werden, um die Länge der Tamponade an die Tiefe der Wunde anzupassen.
- Bei nur schwach exsudierenden Wunden sollte die **UrgoClean** Tamponade vor der Anwendung mit steriler physiologischer Kochsalzlösung befeuchtet werden.
- Überprüfen, dass die **UrgoClean** Tamponade bei der Anwendung in tiefen Wunden gut sichtbar und zugänglich bleibt.
  - Die **UrgoClean** Tamponade mit einem für die Wundlokalisation und den Exsudationsgrad der Wunde geeigneten Sekundärverband abdecken.

### **3 - Verbandwechsel:**

Die **UrgoClean** Tamponade sollte während der Reinigungsphase der Wunde alle 1-2 Tage gewechselt werden, danach sollte die Häufigkeit der Verbandwechsel an das Volumen des Wundexsudates und an die klinische Entwicklung der Wunde angepasst werden. Die sterile Applikationshilfe sowie nicht verwendete Reste der **UrgoClean** Tamponade gemäß den lokal geltenden Vorschriften entsorgen.

### **4 - Entfernen der Tamponade:**

Es ist sicherzustellen, dass die **UrgoClean** Tamponade vollständig aus der Wunde entfernt wurde.

## **VORSICHTSMASSNAHMEN**

- Aufgrund ihrer nicht okklusiven Eigenschaften und ihrer Fähigkeit, Bakterien einzuschließen, kann die **UrgoClean** Tamponade unter strenger medizinischer Überwachung auch bei infizierten Wunden angewendet werden.
- Während der Reinigungsphase kann es, bedingt durch die fortschreitende Beseitigung von fibrinösem Gewebe, zu einer Vergrößerung der Wunde kommen.
- Den Kontakt der Applikationshilfe mit der Wunde so gering wie möglich halten und die Applikationshilfe nicht in der Wunde belassen.
- Vor der Anwendung die Unversehrtheit der sterilen Einzelverpackung überprüfen. Die Tamponade nicht verwenden, wenn die sterile Einzelverpackung beschädigt ist.
- Nicht verschlucken, für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Die **UrgoClean** Tamponade und die Applikationshilfe nicht erneut sterilisieren.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundaufgabe kann Infektionsrisiken hervorrufen.

## **KONTRAINDIKATIONEN**

- Die **UrgoClean** Tamponade nicht bei fistelartigen Wunden verwenden, deren Durchmesser kleiner ist als der der sterilen Applikationshilfe.
- Die **UrgoClean** Tamponade nicht bei trockenen Wunden verwenden.
- Nicht resorbierbar, die **UrgoClean** Tamponade darf nicht als chirurgische Kompresse verwendet werden.
- Die **UrgoClean** Tamponade nicht als endonasale Tamponade bei Nasennebenhöhlenoperationen verwenden.
- Die **UrgoClean** Tamponade nicht zusammen mit Wasserstoffperoxid und Antiseptika aus der Familie der organischen Quecksilberverbindungen bzw. mit Hexamidin verwenden.
- Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die **UrgoClean** Tamponade oder einen der Bestandteile.
- Die **UrgoClean** Tamponade nicht als chirurgische Kompresse bei stark blutenden Wunden anwenden.

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH; Justus-von-Liebig-Str. 16; 66280 Sulzbach

[www.urgo.de](http://www.urgo.de)

CE 0459   

Date of issue : 2011



Latest revision : 2014-04

STERILE R



Made in France

Laboratoires URGO - 42 rue de Lonqvic - 21300 Chenôve - France