



Extra dünne, absorbierende Lipidokolloid-Wundauflage mit Silbersalz und Haftrand

PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTül Ag Lite Border ist eine absorbierende, mit Silbersalz getränkte Lipidokolloid-Wundauflage (TLC) mit Haftrand. Sie setzt sich aus drei Schichten zusammen:

- wundseitig, einer nicht haftenden TLC-Matrix (Polymermatrix, Carboxymethylcellulose, Vaseline und Silbersalz),
- einer nicht sensibilisierenden, dünnen und absorbierenden Kompresse in der Mitte der Wundauflage und
- einer schützenden, weißen Polyurethan-Trägerschicht, die mit einer hochverträglichen Klebmasse beschichtet ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTül Ag Lite Border ist für die lokale Behandlung leicht exsudierender Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion geeignet: chronische Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus) und akute Wunden (z.B. Verbrennungen zweiten Grades, Hautabschürfungen, Unfallverletzungen, Chirurgische Wunden).

EIGENSCHAFTEN

UrgoTül Ag Lite Border ist eine absorbierende Wundauflage mit Haftrand. Sie basiert auf der Lipidokolloidtechnologie (TLC), einer exklusiven, von den Laboratoires URGO entwickelten, patentierten Innovation. Ihre Besonderheit ist ihre Polymermatrix, die den Zusammenhalt der Hydrokolloidpartikel und der Vaseline auf einem Polyestergerüst gewährleistet. In Kontakt mit den Wundexsudaten verflüssigen sich die Hydrokolloidpartikel (CMC) zu einem Gel und bilden eine lipidokolloide Grenzschicht zwischen der Wunde und der Wundauflage.

Daraus resultieren die folgenden spezifischen Eigenschaften der Wundauflage:

- Aufrechterhaltung eines feuchten Wundmilieus, welches die Heilung begünstigt;
- Gelbildung in Kontakt mit der Wunde;
- Atraumatischer Verbandwechsel, Schutz der neugebildeten Gewebestrukturen beim Ablösen des Verbandes;
- Schmerzfreier Verbandwechsel für die Patienten und
- Schutz der Wundumgebung.

Zusätzlich verleihen die in der TLC-Matrix enthaltenen Silberionen **UrgoTül Ag Lite Border** eine antibakterielle Wirksamkeit in Kontakt mit der Wunde. Dadurch wird bei Superinfektionen der Wunde lokal der Bakterienbefall verringert und bei Risikowunden der Entwicklung von Superinfektionen vorgebeugt. Silber zeichnet sich durch ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum aus, einschließlich gramnegativer und grampositiver Bakterien sowie einiger Pilze und Hefen. Es ist besonders wirksam gegen *Staphylococcus aureus*, methicillinresistenten *Staphylococcus aureus* (MRSA), *Streptococcus pyogenes* sowie gegen *Pseudomonas aeruginosa* (*Bacillus pyocyaneus*), d.h.

gegen die am häufigsten für Superinfektionen von Wunden verantwortlichen Keime. In-vitro konnte die antibakterielle Wirksamkeit der Wundauflage während einer Dauer von 7 Tagen nachgewiesen werden. Durch die antibakterielle Wirksamkeit der Wundauflage wird außerdem die durch die Mikroorganismen verursachte Geruchsbildung verringert.

Die absorbierende Kompresse gewährleistet eine optimale Drainage geringer Mengen von Exsudaten und Bakterien. Auf diese Weise verringert die Kompresse das Mazerationsrisiko in der Wundumgebung.

Das Trägermaterial ist flexibel, anpassungsfähig und sehr angenehm. Dadurch passt sich die Wundauflage optimal an das anatomische Relief der Wunde an.

Hinweise für die Anwendung

- Die Wunde mit steriler, physiologischer Kochsalzlösung reinigen. Sofern zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, die Wunde vor der Anwendung von **UrgoTül Ag Lite Border** mit steriler, physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Die Schutzfolien von der Wundauflage entfernen.
- **UrgoTül Ag Lite Border** direkt auf die Wunde auflegen und dabei darauf achten, dass die in der Mitte liegende Kompresse direkt auf der Wunde positioniert wird.
- **UrgoTül Ag Lite Border** sollte alle 1 bis 3 Tage, in Abhängigkeit von der behandelten Wunde und ihrer klinischen Entwicklung, gewechselt werden.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Behandlung mit **UrgoTül Ag Lite Border** darf nur unter medizinischer Kontrolle erfolgen.
- Von der kombinierten Anwendung anderer lokaler Behandlungen wird abgeraten.
- Da keine spezifischen klinischen Daten vorliegen, wird von der Anwendung von **UrgoTül Ag Lite Border** während der Schwangerschaft und Stillzeit, sowie bei Neu- und Frühgeborenen abgeraten.
- Das medizinische Fachpersonal muss berücksichtigen, dass Daten zur langfristigen und wiederholten Anwendung einer silberhaltigen Wundauflage, insbesondere bei Kindern oder Neugeborenen, nur sehr begrenzt vorliegen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Wundauflage mit Elektroden oder leitenden Gelen, wenn Messungen mit elektronischen Geräten (EEG, EKG, usw.) durchgeführt werden.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken hervorrufen.
- Nicht erneut sterilisieren.

KONTRAINDIKATIONEN

- Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber oder anderen Bestandteilen der Wundauflage
- Vor Untersuchungen mittels Magnetresonanztomographie (MRT) muss die Wundauflage entfernt werden.

Vertrieb in Deutschland:

URGO GmbH; Justus-von-Liebig-Str. 16; 66280 Sulzbach

www.urgo.de

Latest revision : 2014-06

Made in France

Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France