

URGOCELL CONTACT

**Absorbierende, mikroadhäsive,
sanft haftende Lipidokolloid-Wundauflage**

DARREICHUNGSFORM UND ZUSAMMENSETZUNG

URGOCELL CONTACT ist eine absorbierende Schaumstoff- Wundauflage, die mit der Technologie **TLC-Contact**, einer Innovation der Laboratoires Urgo, ausgestattet ist. Die Technologie **TLC-Contact** besteht in der Beschichtung einer Polyurethan-Kompresse mit einer mikroadhäsiven Lipidokolloid-Matrix. Diese erleichtert das Anlegen, die Positionierung und das atraumatische (gewebefreundliche) Ablösen der Wundauflage durch ihre mikroadhäsiven Eigenschaften.

URGOCELL CONTACT setzt sich somit aus folgenden Bestandteilen zusammen:

- einer mikroadhäsiven, sanft haftenden Lipidokolloid-Matrix in Kontakt mit der Wunde, die auf eine absorbierende Schaumstoffkompressen aus Polyurethan aufgebracht ist und
- einem elastischen Vliesstoffträger aus Polyurethan

WIRKMECHANISMUS

In Kontakt mit dem Wundexsudat nehmen die Hydrokolloidpartikel der TLC-Contact-Matrix eine gelartige Konsistenz an und bilden einen Lipidokolloidfilm an der Grenzschicht zwischen Wunde und Wundauflage.

Daraus ergeben sich folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen feuchten Wundmilieus,
- Gelbildung in Kontakt mit der Wunde,
- Keine Schädigung der neu gebildeten Gewebestrukturen beim Ablösen der Wundauflage,
- Schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten,
- Schutz der periläsionellen Haut (Wundumgebung) aufgrund der guten Verträglichkeit der mikroadhäsiven Masse,
- Die absorbierende Kompresse gewährleistet eine optimale Drainage der Exsudate und schützt so die periläsionelle Haut vor Mazerationen.
- Das Trägermaterial ist flexibel, sehr komfortabel und anpassungsfähig. Es gewährleistet somit eine optimale Anpassung der Wundauflage an die anatomische Beschaffenheit der Wunde.
- Die mikroadhäsive Wundauflage erleichtert die pflegerischen Maßnahmen in Bezug auf die Durchführung und Überwachung der Behandlung.

ANWENDUNGSGEBIETE

URGOCELL CONTACT ist für die Behandlung aller exsudierenden chronischen Wunden (Druckgeschwüre, Hautgeschwüre, Diabetisches Fußsyndrom) und exsudierenden akuten Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, Unfallverletzungen, Operationswunden) geeignet.

Da **URGOCELL CONTACT** keinen mit einer Klebmasse beschichteten Haftrand hat, ist diese Wundauflage besonders für die Behandlung von Wunden mit empfindlicher Wundumgebung geeignet.

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

Vorbereitung der Wunde:

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und anschließend mit steriler, physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Die Haut in der Wundumgebung sorgfältig trocknen.

Anlegen der Wundauflage:

- Abziehen der Schutzfolien,
- **URGOCELL CONTACT** mit der mikroadhäsiven, sanft haftenden, weißen Seite auf die Wunde auflegen. **URGOCELL CONTACT** kann mit einem sterilen Produkt (z.B. sterile Schere) zugeschnitten werden, um gegebenenfalls die Größe der Wundauflage an die Wunde anzupassen.

Die Wundauflage mit einem Sekundärverband (z.B. Urgoflex) fixieren. Die Wundauflage kann je nach ärztlicher Verordnung auch unter einem Kompressionsverband verwendet werden.

Verbandwechsel:

URGOCELL CONTACT soll je nach Exsudatvolumen und klinischem Zustand der Wunde alle 2 bis 4 Tage gewechselt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Die mikroadhäsive Lipidokolloid-Matrix von **URGOCELL CONTACT** haftet an chirurgischen Latexhandschuhen. Es wird daher empfohlen, jeglichen Kontakt mit der beschichteten, mikroadhäsiven Seite zu vermeiden oder für das Auflegen des Verbandes sterile Pinzetten zu verwenden. Aufgrund des nicht- okklusiven Charakters der Wundauflage kann **URGOCELL CONTACT** unter strenger medizinischer Kontrolle auch bei infizierten Wunden angewendet werden. Sollten Zweifel bezüglich einer möglichen Keimbeseidlung der Wunde bestehen, wird eine vorherige Behandlung mit **URGOCELL SILVER** empfohlen.

Die Wundauflage nicht erneut sterilisieren.

Die Wundauflage **URGOCELL CONTACT** flach, vor Licht, Feuchtigkeit und Hitze (Temperatur unter 25°C) geschützt lagern.

URGOCELL CONTACT ist strahlensterilisiert.

Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt:

Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken hervorrufen.

Vertrieb in Deutschland:

Urgo GmbH; Justus-von-Liebig-Str. 16; 66280 Sulzbach
www.urgo.de