



GAZEWUNDAUFLAGE MIT TLC-MATRIX MIT SILBERSALZ

DE - PRODUKTBESCHREIBUNG

UrgoTül Silver ist eine mit Silbersalz getränkte Wundauflage, die auf der Grundlage der Lipidkolloid-Technologie (TLC = Technology Lipido Colloid), einer exklusiven und patentierten Innovation der Laboratoires URGO, entwickelt wurde.

UrgoTül Silver ist eine nicht haftende, nicht okklusive, mit der Wunde nicht verklebende Lipidkolloidwundauflage, die aus einem Netz von Polyesterfasern besteht, welches mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose CMC), Vaseline und Silbersalz getränkt ist.

ANWENDUNGSGEBIETE

UrgoTül Silver ist für die lokale Behandlung von Wunden mit dem Risiko oder Anzeichen einer lokalen Infektion geeignet: chronische Wunden (Unterschenkelgeschwüre, Druckgeschwüre) und akute Wunden (z.B. Verbrennungen 2. Grades, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, chirurgische Wunden).

Da **UrgoTül Silver** nicht haftet, ist die Wundauflage besonders zur Behandlung von Wunden mit empfindlicher Wundumgebung geeignet.

WIRKMECHANISMUS

Die Lipidkolloid-Technologie ist eine Innovation der Laboratoires URGO. Sie zeichnet sich durch eine Polymermatrix aus, die die Kohäsion der Hydrokolloidpartikel und der Vaseline auf einem Polyestergitter gewährleistet. In Kontakt mit den Wundexsudaten nehmen die Hydrokolloidpartikel (CMC) eine gelartige Konsistenz an und bilden eine lipidokolloide Grenzschicht in Kontakt mit der Wunde.

Dieser Technik verdankt die Wundauflage folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen physiologischen Milieus,
- Gelbildung in Kontakt mit den Wundexsudaten,
- Schutz des neu gebildeten Gewebes beim Abnehmen der Wundauflage,
- Schmerzfreier Verbandwechsel für den Patienten und
- Schutz der Wundumgebung.

Des Weiteren setzt **UrgoTül Silver** in Kontakt mit dem Wundexsudat schrittweise Silberionen frei. Diese in der TLC-Matrix enthaltenen Silberionen verleihen **UrgoTül Silver** eine lokale antibakterielle Kontaktwirksamkeit, die die lokale bakterielle Besiedlung von infektionsgefährdeten Wunden reduziert. Silber besitzt ein breites antimikrobielles Wirkungsspektrum einschließlich gramnegativer und grampositiver Bakterien, bestimmter Schimmelpilze und Hefen. Es ist besonders wirksam gegen *Staphylococcus aureus*, methicillinresistenten *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pyogenes* sowie gegen *Pseudomonas aeruginosa*. Diese Keime verursachen am häufigsten Infektionen von Wunden. In vitro wurde die antibakterielle Wirksamkeit der

Wundauflage über einen Zeitraum von 7 Tagen nachgewiesen. Durch die antibakterielle Wirkung der Wundauflage kann der durch Mikroorganismen in der Wunde hervorgerufene Geruch reduziert werden.

Dank seiner chemischen Zusammensetzung verklebt **UrgoTül Silver** nicht mit der Wunde und den Wundrändern.

Die Verbandwechsel sind daher schmerzfrei für den Patienten und gewebefreundlich für die Wunde. **UrgoTül Silver** ist weich und sehr flexibel und passt sich optimal an das anatomische Relief der Wunde an.

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Falls zuvor ein Antiseptikum verwendet wurde, die Wunde vor der Anwendung von **UrgoTül Silver** sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung spülen.
- Die Schutzfolien von **UrgoTül Silver** abziehen.
- **UrgoTül Silver** direkt auf die Wunde auflegen.
- Bedecken Sie **UrgoTül Silver** mit einem Sekundärverband, z.B. mit sterilen Kompressen, die mit einer dehnbaren Binde (z.B. Urgoflex) oder mit einem großflächigen, dehnbaren Heftpflaster fixiert werden.
- Je nach Art und Heilungsfortschritt/klinischer Entwicklung der behandelten Wunde sollte **UrgoTül Silver** alle 1 bis 3 Tage gewechselt werden.

WARNHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die Behandlung mit **UrgoTül Silver** darf nur unter ärztlicher Überwachung erfolgen.
- **UrgoTül Silver** kann an chirurgischen Handschuhen (Latex und Vinyl) haften. Um die Handhabung von **UrgoTül Silver** zu erleichtern, ist es ratsam, die Handschuhe vor der Anwendung von **UrgoTül Silver** mit steriler physiologischer Kochsalzlösung zu befeuchten.
- Von einer gleichzeitigen Anwendung anderer Produkte zur lokalen Wundbehandlung wird abgeraten.
- Über die Anwendung von **UrgoTül Silver** während der Schwangerschaft, der Stillzeit, bei Früh- und Neugeborenen liegen keine Daten vor.
- Das medizinische Fachpersonal muss berücksichtigen, dass Daten zur langfristigen und wiederholten Anwendung einer silberhaltigen Wundauflage, insbesondere bei Kindern oder Neugeborenen, nur sehr begrenzt vorliegen.
- Während Untersuchungen mit elektronischen Geräten, z.B. EEG oder EKG, den Kontakt mit Elektroden oder leitenden Gelen vermeiden.
- Sterile Einzelverpackung nur zum Einmalgebrauch bestimmt Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionsrisiken hervorrufen.
- Die Wundauflage nicht erneut sterilisieren.

KONTRAINDIKATIONEN

Bekannte Überempfindlichkeit gegenüber Silber oder anderen Bestandteilen der Wundauflage.

Die Wundauflage bei Patienten, die mit Magnetresonanztomographie (MRT) untersucht werden, vor der Untersuchung entfernen.

www.urgo.de

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH, Justus-von-Liebig-Str. 16, 66280 Sulzbach