

Urgotül® Duo

DE

LIPIDOKOLLOID-WUNDAUFLAGE MIT SCHÜTZENDER UND ABSORBIERENDER KOMPRESSE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Urgotül® Duo ist das Produkt einer innovativen Technologie, die exklusiv im Hause URGO entwickelt wurde = Lipidokolloid-Technologie.

Urgotül® Duo ist eine nicht haftende, nicht okklusive Lipidokolloid-Wundauflage, die aus einem Polyestergerüst besteht, welches mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose) und Vaseline beschichtet ist und mit einer neutralen, schützenden und absorbierenden Kompresse (100% Viskose) kombiniert ist.

EIGENSCHAFTEN

Urgotül® Duo dient der Behandlung oberflächlicher Wunden (Verbrennungen, Hautabschürfungen, traumatische Wunden, postoperative Wunden), chronischer Wunden (Ulcus cruris, Dekubitus) in der Granulations- und Epithelisierungsphase und Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa. Lipidokolloid-Technologie (TLC =Technology Lipido-Colloid): In Verbindung mit dem Wundsekret bildet sich ein Gel aus Hydrokolloidpartikeln, welches mit der Vaseline des **Urgotül® Duo** eine lipidokolloide Grenzschicht bildet. Dies wirkt sich günstig auf die Wundheilung aus (Wundheilung in feuchtem Milieu). Die Kompresse von **Urgotül® Duo** verleiht der Wundauflage schützende und absorbierende Eigenschaften. Dadurch ermöglicht **Urgotül® Duo** eine einfachere Handhabung und einen besseren Tragekomfort für den Patienten. Das zusätzliche Aufbringen einer Kompresse oder sterilen Gaze ist nicht mehr notwendig.

Die Flexibilität und die geringe Dicke der Wundauflage sorgen für eine sehr gute Anpassungsfähigkeit. Dadurch ist **Urgotül® Duo** speziell für die Versorgung von Wunden an schwierigen Lokalisationen geeignet.

Die luftdurchlässige Struktur des Gitternetzes sowie die Gasdurchlässigkeit der Kompresse schützen vor Mazerationen.

Urgotül® Duo enthält Fette, ohne sich fettig anzufühlen. Aufgrund seiner Zusammensetzung verklebt **Urgotül® Duo** nicht mit der Wunde und den Wundrändern. Der Verband lässt sich schmerzfrei wechseln, ohne den Heilungsprozess zu stören.

ANWENDUNG

- Reinigen Sie die Wunde mit steriler physiologischer Kochsalzlösung.
- Falls die Wunde zuerst mit einem Desinfektionsmittel behandelt wurde, spülen Sie die Wunde vor der Anwendung von **Urgotül® Duo** sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung.
- Ziehen Sie die Schutzfolien von **Urgotül® Duo** ab. Durch die beiden gefalteten Schutzfolien wird die Anwendung erleichtert und das Gitternetz (die TLC-Matrix) von **Urgotül® Duo** kann ohne Berührung direkt auf die Wunde aufgebracht werden.

Urgotül® Duo kann mit sterilen Produkten (Scheren) zugeschnitten werden, um die Größe des Verbandes an die Wunde anzupassen.

- **Urgotül® Duo** darf nicht gefaltet werden.
- Fixieren Sie **Urgotül® Duo** mit einer dehnbaren Binde (z.B. Urgomull® haft, Urgoflex®), einem stark dehnbaren Rollenpflaster (z.B. Urgoderma® Stretch) oder einem Schlauchverband (z.B. Urgotube).
- Je nach Art der behandelten Wunde und ihrer klinischen Entwicklung, soll **Urgotül® Duo** alle 2 bis 4 Tage gewechselt werden.
- Bei der Behandlung von Wunden als Folge der Erbkrankheit Epidermolysis bullosa muss der Verband alle 1 bis 3 Tage gewechselt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Die beiden Schutzfolien ermöglichen ein einfaches Aufbringen auf die Wunde:
 - ohne das Gitternetz (der TLC-Matrix) von **Urgotül® Duo** zu berühren,
 - ohne mit chirurgischen Handschuhen (Latex und Vinyl) zu verkleben.

- Nach dem Abziehen der Schutzfolien die Seite von **Urgotül® Duo** mit dem Gitternetz (der TLC-Matrix) direkt auf die Wunde auflegen.
- **Urgotül® Duo** nicht falten.
- Im Fall von klinischen Anzeichen einer lokalen Infektion kann die Behandlung nach Rücksprache mit dem Arzt fortgesetzt werden.

Urgotül® Duo ist strahlensterilisiert

Vertrieb in Deutschland:

URGO GmbH: Justus-von-Liebig-Str. 16: 66280 Sulzbach

www.urgo.de

Laboratoires Urgo – 42 rue de Longvic – 21300 Chenôve - France

