

**Sterile physiologische
Kochsalzlösung
Spray 150 ml**

Zusammensetzung:

Natriumchloridlösung 0,9%, steril- ohne Konservierungsstoff

Treibmittel: Stickstoff

Nach jeder Benutzung und bis zum Ablauf des Verfalldatums bleibt der Inhalt steril.

Anwendung:

Die sterile Lösung dient der Reinigung oberflächlicher Wunden.

Vorsichtsmaßnahmen:

Vor jeder Benutzung einmal in die Luft sprühen, um den Sprühkopf zu reinigen.

Aus ca. 20 cm Entfernung reichlich auf die Wunde aufsprühen.

Kontakt des Sprühkopfes mit der Wunde vermeiden.

Nur zur äußeren Anwendung. Nicht injizieren.

Bemerkungen:

Behälter steht unter Druck

Vollen oder entleerten Behälter vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen unter 0°C und über 50°C schützen.

Behälter nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen, auch nicht im entleerten Zustand.

Nicht in die Augen sprühen. Direktes Einatmen vermeiden.

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.

Made in France:

Laboratoires URGO

42 rue de Longvic, 21300 Chenôve

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH, Justus-von-Liebig-Str.16, 66280 Sulzbach

www.urgo.de