



DE

Extra dünne, absorbierende Lipidokolloid-Wundauflage mit Hafrand

DARREICHUNGSFORM UND ZUSAMMENSETZUNG

URGOTÜL LITE BORDER ist eine selbsthaftende, absorbierende Lipidokolloid-Wundauflage, die auf Basis der Lipidokolloid-Technologie (TLC = Technology Lipido Colloid), einer exklusiven und patentierten Innovation der Laboratoires URGO, entwickelt wurde.

URGOTÜL LITE BORDER setzt sich aus folgenden Bestandteilen zusammen:

1. Einer nicht haftenden Lipidokolloid-Matrix in direktem Kontakt mit der Wunde. Sie besteht aus einer Polyestermatrix, welche mit Hydrokolloidpartikeln (Carboxymethylcellulose) und Vaseline getränkt ist.
2. Einer dünnen, absorbierenden, nicht sensibilisierenden Kompresse in der Mitte der Wundauflage.
3. Einem weißen, schützenden Vliesstoffträger aus Polyurethan, der mit einer sehr gut hautverträglichen Klebmasse beschichtet ist.

Sterile Einzelverpackung, nur zum Einmalgebrauch bestimmt: Die Wiederverwendung einer zum Einmalgebrauch bestimmten Wundauflage kann Infektionen hervorrufen.

WIRKMECHANISMUS

In Kontakt mit dem Wundexsudat nehmen die Hydrokolloidpartikel der Lipidokolloid-Matrix (TLC) eine gelartige Konsistenz an und bilden zusammen mit der Vaseline eine lipidokolloide Grenzschicht zwischen Wunde und Wundauflage. Dadurch entsteht ein feuchtes Wundmilieu, welches den Heilungsprozess begünstigt.

Daraus ergeben sich folgende spezifische Eigenschaften:

- Aufrechterhaltung eines für die Wundheilung günstigen feuchten Wundmilieus,
- Gelbildung in Kontakt mit der Wunde,
- Atraumatische Verbandwechsel, Schutz der neu gebildeten Gewebestrukturen beim Ablösen der Wundauflage,
- Schmerzfreie Verbandwechsel für den Patienten und
- Schutz der Wundumgebung durch die hohe Hautverträglichkeit der Klebmasse.

Die absorbierende Kompresse gewährleistet eine optimale Drainage geringer Volumen von Wundexsudaten und schützt so die Wundumgebung vor Mazerationen. Das selbsthaftende Trägermaterial ist flexibel und passt sich optimal an das anatomische Relief der Wunde an.

INDIKATIONEN

URGOTÜL LITE BORDER ist für die Behandlung akuter Wunden (z.B. traumatischer Wunden, Hautabschürfungen, postoperativer Wunden, Verbrennungen) und chronischer Wunden (z.B. Ulcus cruris, Dekubitus) in der Granulations- und Epithelisierungsphase geeignet.

HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG

Vorbereitung der Wunde:

- Die Wunde gemäß dem üblichen Pflegeprotokoll reinigen und mit steriler, physiologischer Kochsalzlösung spülen.

- Falls die Wunde zuvor mit einem Antiseptikum behandelt wurde, spülen Sie die Wunde vor der Anwendung von **URGOTÜL LITE BORDER** sorgfältig mit steriler physiologischer Kochsalzlösung.

Anlegen der Wundauflage: Ziehen Sie die Schutzfolien ab und bringen Sie **URGOTÜL LITE BORDER** so auf die Wunde auf, dass die zentrale Kompresse auf der Wunde positioniert ist.

Verbandwechsel: Die Wundauflage **URGOTÜL LITE BORDER** kann je nach Exsudatvolumen und klinischem Zustand der Wunde bis zu 5 Tage auf der Wunde belassen werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Auf Grund seiner nicht okklusiven Eigenschaften kann **URGOTÜL LITE BORDER** unter der Voraussetzung häufiger Verbandwechsel und strenger medizinischer Überwachung auch auf einer infizierten Wunde angewendet werden.

Die Wundauflage nicht erneut sterilisieren.

URGOTÜL LITE BORDER liegend lagern.

Vertrieb in Deutschland: URGO GmbH; Justus-von-Liebig Str. 16; 66280 Sulzbach
www.urgo.de

 **0459** Date of issue : 2008  Latest revision : 2012 - 02  

 Made in France
Laboratoires URGO - 42 rue de Longvic - 21300 Chenôve - France
www.urgomedical.fr

