

v-code
3949

**ALLERGAN**

3949

71566EW15

CELLUMED®

v-code
3949

Sofortige und lang anhaltende Erleichterung bei Trockenheit und Müdigkeit der Augen.

CELLUMED® verschafft wohltuende und schnelle Linderung beim Gefühl von Trockenheit in den Augen und bei Reizungen, die durch Staub, intensives Licht, Pollen, Luftverschmutzung, Überanstrengung und Überarbeitung der Augen verursacht werden.

CELLUMED® lindert schnell und anhaltend unangenehme Reizerscheinungen bei allen Kontaktlinsenträgern.

Anwendung:




- 1 bis 2 Tropfen der Lösung in das betroffene Auge geben.
- Anwendung nach Bedarf wiederholen.
- Sie können auch während des Tragens von Kontaktlinsen nachbenetzen, ohne diese von den Augen zu nehmen.

Geeignet für alle Arten von Kontaktlinsen.

Vorsichtshinweise:

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Deckels vor dem ersten Öffnen beschädigt ist.
- Lösung nicht einnehmen.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren; vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit dem Auge.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Lösungsreste 60 Tage nach dem Öffnen verwerfen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten diese im Abstand von mindestens 10 Minuten eingeträufelt werden.

Wenn die Reizerscheinungen anhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.

Enthält:

Natriumcarboxymethylcellulose	1,0 %
PURITE®	0,0075 %

 **Hersteller:**
Allergan Pharmaceuticals Ireland,
Castlebar Road,
Westport,
Co. Mayo,
Irland

CE 0459 STERILE A

 **ALLERGAN**

® marks owned by Allergan, Inc.
© 2014 Allergan, Inc., Irvine CA 92612