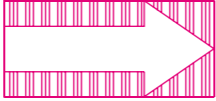
 **ALLERGAN**


 **CELLUFRESH®**

**Sofortige und lang anhaltende Erleichterung bei Trockenheit und Müdigkeit der Augen. Augentropfen für alle Kontaktlinsenträger.**


Praktische Flasche zur Mehrfachanwendung.  
Packungsgrößen 10 ml und 3 x 10 ml

CELLUFRESH® verschafft aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung wohltuende und schnelle Linderung beim Gefühl von Trockenheit in den Augen und bei Reizungen, die durch Staub, intensives Licht, Blüten und Pollen, Luftverschmutzung, Überanstrengung und Überarbeitung der Augen verursacht werden. CELLUFRESH® lindert schnell und anhaltend unangenehme Reizerscheinungen bei allen Kontaktlinsenträgern.

**Anwendung:**

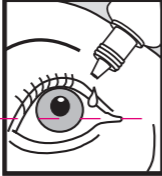



- 1 bis 2 Tropfen der Lösung in das betroffene Auge geben.
- Anwendung nach Bedarf wiederholen.
- Sie können auch während des Tragens von Kontaktlinsen nachbenetzen, ohne diese von den Augen zu nehmen.



- Um den Tragekomfort noch weiter zu erhöhen, können Sie auch einige Tropfen auf jede Linse geben, bevor Sie diese auf das Auge setzen.
- Geeignet für alle Arten von Kontaktlinsen.

**Vorsichtshinweise:**  
**Beachten Sie bitte unbedingt die Angaben in der Gebrauchsinformation.**  
**Eine Mißachtung insbesondere der Pflegeanweisungen und Hygienevorschriften kann zu schwerwiegenden Augeninfektionen und -schäden führen.**


- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch sind.

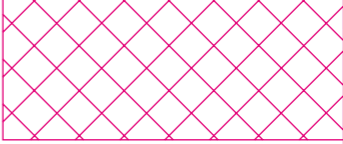


- Lösung nicht einnehmen.
- Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren; vermeiden Sie auch den direkten Kontakt mit dem Auge.
- Flasche nach Gebrauch fest verschließen.
- Lösungsreste 60 Tage nach dem Öffnen verwerfen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht nach Ablauf des Verfalldatums.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Bei Raumtemperatur aufbewahren.
- Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten diese im Abstand von mindestens 10 Minuten eingeträufelt werden.
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Deckels vor dem ersten Öffnen beschädigt ist.
- Selten können Reizungen am Auge auftreten. Wenn die Reizerscheinungen anhalten, sprechen Sie bitte mit Ihrem Augenarzt.

**Enthält:**

Natriumcarboxymethylcellulose	0,5 %
PURITE®	0,005 %

 **Hersteller:**  
Allergan Pharmaceuticals Ireland,  
Castlebar Road, Westport, Co. Mayo, Irland

CE 0459 **STERILE A**

 **ALLERGAN**

® marks owned by Allergan, Inc.  
© 2014 Allergan, Inc., Irvine CA 92612

71915EW12

INSERT, TYPE B2,  
PENCIL FOLD,  
114MM X 220MM,  
FOLDED TO 114MM X 23MM  
0106501