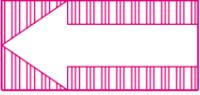
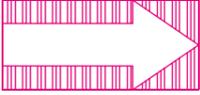


 **ALLERGAN**

GEBRAUCHSANLEITUNG 

 **Optive
FUSION™**

Eine spezielle Kombinationsformel für schnelle Hilfe bei Symptomen des trockenen Auges. Für Augenwohlgefühl und anhaltenden Schutz.

Beschreibung:
OPTIVE FUSION™ ist eine sterile Lösung in einem Mehrdosenbehältnis, die 0,1 % Natriumhyaluronat, 0,5 % Natriumcarboxymethylcellulose, 0,9 % Glycerol, 0,5 % Erythritol und 0,01 % des Konservierungsmittels PURITE® enthält, das auf dem Auge zu natürlichen Bestandteilen der Tränenflüssigkeit abgebaut wird.

OPTIVE FUSION™ ist zur Anwendung mit allen Arten von Kontaktlinsen geeignet und kann nach dem Öffnen 6 Monate verwendet werden.

Gebrauchsanweisung
Nach Bedarf 1 oder 2 Tropfen in das/die Auge(n) geben.

Vorsichtshinweise

- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe allergisch reagieren
- Lösung nicht einnehmen
- Um Verunreinigungen oder mögliche Augenverletzungen zu vermeiden, sollten Sie die Tropferspitze nicht berühren und direkten Kontakt mit dem Auge vermeiden
- Die Flasche unmittelbar nach dem Gebrauch fest verschließen
- Lösungsreste 6 Monate nach dem Öffnen verwerfen
- Nicht nach Ablauf des auf dem Produkt angegebenen Verfalldatums benutzen
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Bei Raumtemperatur aufbewahren
- Verwenden Sie die Flasche nicht, wenn die Versiegelung des Verschlusses vor dem ersten Öffnen beschädigt ist
- Nicht verwenden, wenn sich die Farbe der Lösung verändert hat
- Bei der Verwendung zusammen mit anderen Augentropfen sollten zwischen den Anwendungen mindestens 5 Minuten liegen.




Warnhinweise
Wenn Sie Augenschmerzen bekommen, sich das Sehvermögen verändert, anhaltende Rötung oder Augenreizungen auftreten oder sich Ihr Zustand verschlechtert, dann beenden Sie bitte die Anwendung und suchen Sie einen Arzt auf.

Wie ist das Produkt erhältlich?
OPTIVE FUSION™ ist in Kunststofffläschchen mit 3, 10 oder 15 ml erhältlich.


Hersteller:
Allergan Pharmaceuticals Ireland
Castlebar Road
Westport, Co. Mayo
Irland

CE 0459 **STERILE A**

 **ALLERGAN**

© 2014 Allergan, Inc.
™ & ® marks owned by Allergan, Inc.

72652EW11

**INSERT, TYPE B 3,
PENCIL FOLD,
265mm X 114mm,
FOLDED TO 114mm x 23mm
0106601**