

Gebrauchsanweisung

Vismed[®] multi

Hyaluronsäure, Natriumsalz aus Fermentation 0,18%.

Benetzungslösung für das Auge.

Steril, frei von Konservierungsstoffen.

Zusammensetzung: 1 ml hypotonische Lösung enthält 1,8 mg Hyaluronsäure-Natriumsalz sowie Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat, Natriumzitat, Magnesiumchlorid, Kalziumchlorid, Wasser für Injektionszwecke.

Anwendungsgebiete: Zur Benetzung der Augen bei subjektiv empfundenem Trockenheitsgefühl sowie bei brennenden und müden Augen und anderen geringfügigen Befindlichkeitsstörungen ohne Krankheitswert, verursacht z.B. durch Staub, Rauch, trockene Hitze, klimatisierte Luft, Wind, Kälte, längerdauernde Bildschirmarbeit oder Kontaktlinsentragen (harte und weiche).

Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Nicht gleichzeitig mit Arzneimitteln oder anderen Produkten, welche auf das Auge aufgetragen werden, anwenden, da Vismed[®] multi deren Wirkung verändern kann.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung): Das Fläschchen von Vismed multi ist mit einem innovativen Dosiersystem versehen, welches das Eintropfen der Lösung in das Auge wesentlich erleichtert. Bitte lesen Sie aufmerksam die weiter unten befindliche Anleitung. Soweit nicht anders empfohlen, nach Bedarf 1-2 Tropfen Vismed[®] multi auf das Auge auftragen.

Hinweise: Tropföffnung des Dosiersystems nicht berühren und nicht an das Auge bringen. Beschädigte Packungen von Vismed[®] multi nicht anwenden. Vismed[®] multi kann nach der ersten Anwendung für einen Zeitraum von drei Monaten verwendet werden.

Zwischen 2 und 25 Grad C lagern! Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Falls Ihre Beschwerden unter der Anwendung von Vismed[®] multi anhalten oder nach Absetzen von Vismed[®] multi wieder auftreten, sollten Sie sich in ärztliche Behandlung begeben. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Eigenschaften und Wirkungsweise: Vismed[®] multi enthält Hyaluronsäure, ein natürliches Polymer, das auch in Strukturen des menschlichen Auges vorkommt. Die besonderen physikalischen Charakteristika von Hyaluronsäure verleihen Vismed[®] multi seine wichtigen „viskoelastischen“ und wasserbindenden Eigenschaften. Vismed[®] multi bildet eine stabile Schicht auf der Oberfläche des Auge, die nur allmählich durch den Lidschlag entfernt wird. Vismed[®] multi verbindet deshalb lang anhaltende Wirkung mit maximalem Komfort. Vismed[®] multi ist wegen seiner besonderen Zusammensetzung ausgezeichnet verträglich. Vismed[®] multi ist frei von Konservierungsmitteln.

Darreichungsform und Packungsgröße:

Fläschchen mit 10 ml konservierungsmittelfreier Lösung, mit einem innovativen Dosiersystem.

Stand der Information: Dezember 2005

Hersteller:
TRB Chemedica AG, D - 85540 Haar / München

(Abbildung 1)

(Abbildung 2)

(1) Nehmen Sie vor der Anwendung die Schutzkappe vom Fläschchen. Vermeiden Sie jede Berührung der Tropföffnung. Nehmen Sie das Fläschchen so zwischen Daumen und Zeigefinger, dass die Tropföffnung unten liegt und der Daumen diese frei läßt. Vor der ersten Anwendung muß das Ventil mehrfach betätigt werden, bis ein erster Tropfen Lösung ausgeworfen wird. Dazu üben Sie mit dem Zeigefinger Druck auf das Fläschchen aus.

(2) Legen Sie den Kopf leicht in den Nacken und ziehen Sie mit den Fingern der freien Hand das Unterlid etwas nach unten. Halten Sie das Fläschchen so, dass der Daumen mit dem Fläschchen auf den Fingern der anderen Hand aufliegt und die Tropföffnung direkt auf das geöffnete Auge gerichtet ist. Drücken Sie mit dem Zeigefinger das Fläschchen nach unten, um einen Tropfen Lösung auf das Auge aufzubringen. Setzen Sie nach Gebrauch die Schutzkappe auf das Fläschchen.