



# ECO-FOOM®

Nicht haftende Schaumstoffwundauflage  
für mäßig bis stark exsudierende Wunden

## PRODUKTBESCHREIBUNG:

**ECO-FOOM** ist eine sterile, nicht haftende Schaumstoffwundauflage, die aus einem hydrophilen absorbierenden Polyurethanschaum und einer perforierten Wundkontaktschicht besteht. Die Wundauflage ist nach außen mit einem rosafarbenen, wasser- und bakterienundurchlässigen, reibungsarmen Polyurethanfilm beschichtet.

## INDIKATIONEN:

**ECO-FOOM** ist zur Behandlung von mäßig bis stark exsudierenden, chronischen und akuten Wunden geeignet. Die Wundauflage kann über den gesamten Heilungsprozess hinweg bei Wunden wie Druckulzera, venösen Unterschenkelulzera, diabetischen Ulzera, Lazerationen, Schürfwunden, postoperativen Wunden, oberflächlichen Verbrennungen und Verbrennungen 2. Grades sowie kavitären Wunden angewendet werden. Bei kavitären Wunden ist nur eine Anwendung als Sekundärverband möglich. **ECO-FOOM** ist zur Anwendung unter Kompressionsverbänden geeignet.

## VORSICHTSMASSNAHMEN:

Nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Polyurethanfilme oder -schäume verwenden. Nicht mit Oxidationsmitteln wie Wasserstoffperoxid oder Hypochlorit verwenden, da diese die absorbierende Polyurethankomponente beschädigen können. Nur zur äußeren Anwendung. Die Wundauflage weder ganz noch in Teilen wiederverwenden, da die Sterilität und/oder die Wirkweise der Wundauflage beeinträchtigt sein können. **ECO-FOOM** ist für eine kurzzeitige Anwendung bestimmt. Für eine Langzeitanwendung wird eine klinische Beurteilung durch einen Arzt oder medizinisches Fachpersonal empfohlen.

## ANWENDUNGSHINWEISE:

1. Wählen Sie eine Abmessung von **ECO-FOOM** aus, die etwas größer ist als die Wunde. Die Wundauflage kann, falls notwendig, mit einer sterilen Schere zugeschnitten werden. Entsorgen Sie nicht verwendetes Verbandmaterial, um ein Kontaminationsrisiko zu vermeiden.
2. Bringen Sie die Wundauflage mit der rosafarbenen Seite nach außen zentriert auf die Wunde auf.
3. Die Wundauflage kann mit einem geeigneten Fixierpflaster fixiert werden, damit sie an der gewünschten Position verbleibt. Das Fixierpflaster sollte nur an den Rändern der Wundauflage angebracht werden und die Wundauflage nicht überdecken, da dies die Wirkweise der Wundauflage beeinträchtigen kann. Sollte die Wundauflage unter einem Kompressionsverband angewendet werden, wird kein Fixierpflaster benötigt, da die Wundauflage durch den Kompressionsverband an Ort und Stelle gehalten wird.

## VERBANDWECHSEL:

1. **ECO-FOOM** kann in Abhängigkeit vom Zustand der Wunde und der Exsudatmenge bis zu 7 Tagen auf der Wunde verbleiben. Zu Beginn der Behandlung könnte es erforderlich sein, die Wunde oder die Wundauflage häufiger zu überwachen und die Wundauflage zu wechseln, wenn bewährte Praktiken in der Wundversorgung dies vorsehen.
2. Entfernen Sie die Wundauflage vorsichtig von der Wunde und entsorgen Sie diese gemäß den lokal geltenden Vorschriften und Verfahren.
3. Reinigen Sie die Wunde, falls notwendig, vor dem Aufbringen einer neuen Wundauflage mit einem zur Wundreinigung geeigneten Mittel.



Oberer Temperaturgrenzwert (<25°C/77°F)



kein Latex enthalten



Artikelnummer



nicht wiederverwenden



Achtung



für mäßig bis stark exsudierende Wunden



strahlensterilisiert



Gebrauchsanweisung beachten



Hersteller



nicht erneut sterilisieren



verwendbar bis



Kennnummer der benannten Stelle des Herstellers



bei beschädigter Einzelverpackung nicht verwenden



Chargennummer

Letzte Überarbeitung der Gebrauchsinformation: 2013-02



Advanced Medical Solutions Ltd, Premier Park,  
33 Road One, Winsford Industrial Estate, Winsford,  
Cheshire, CW7 3RT, UK.

Vertrieb durch ROBIN WOUND GmbH,  
Nell-Breuning-Allee 6, D-66115 Saarbrücken