

Gebrauchsinformation Aktimed® TAPE PLUS

Aktimed® TAPE PLUS ist ein elastischer Tapeverband (kinesiologisches Tape) mit integrierten hochgereinigten pflanzlichen Extrakten aus Arnica montana, Ruhs toxicodendron und Ruta graveolens. Die Hauptwirkungen des herkömmlichen kinesiologischen Tapes können durch die schmerzlindernden, abschwellenden und durchblutungsfördernden Eigenschaften der pflanzlichen Extrakte optimal unterstützt werden. Es kommt zu einem Zusammenspiel des Trägermaterials und der pflanzlichen Extrakte. Diese werden an den zu behandelnden Stellen eingebracht und wirken lokal an der geschädigten Struktur. Somit kann eine zusätzliche Gabe von schmerzlindernden / abschwellenden Tabletten / Salben im wesentlich geringeren Umfang als üblich möglich sein.

Anwendungsgebiete:

Prophylaxe / Therapie / Rehabilitation von Muskel-, Sehnen – und Gelenkbeschwerden.

Beispiele: HWS-, BWS-, LWS-Syndrom, Frische Verletzungen mit ausgeprägten Hämatomen (z.B. Muskel-faserriss) Prellungen, Beschleunigungstraumen, Hallux valgus, Fersensporn, Überdehnung, Sehnen und Bänderverletzungen, Spannungskopfschmerz, Rheumatische Beschwerden, Carpaltunnel-Syndrom, Tennis- u. Golfarm, Rotatorenmanschettenverletzungen, Impigment-Syndrom, Migräne, Gonarthrose, Coxarthrose, Narben, Fibrosen, Ischialgie, Achillessehnenverletzung, Nachbehandlung von Frakturen und Luxationen nach Gipsruhigstellung.

Wirkungsspektrum:

Regulierung des Muskeltonus, Verbesserung der Muskelfunktion, Stabilisierung der Gelenke, Förderung der Beweglichkeit, Schmerzlinderung, Stoffwechsellanregung, Förderung der lokalen Durchblutung, Aktivierung des Lymphsystems, Förderung der Mikrozirkulation.

Anwendungshinweise:

Das Produkt ist für den einmaligen Gebrauch und nur zur Anwendung geschulter Personen bestimmt. Vor Anwendung muss die Haut gereinigt und fettfrei sein. Schutzfolie entfernen. Je nach Indikation das Tape mit und ohne Dehnung aufkleben. Kleber entfaltet seine Klebewirkung durch Wärmeeinwirkung. Dafür wird empfohlen, das Tape von der Basis aus immer zum Tape-Ende auszustreichen. Vor sportlicher Aktivität sollte das Tape 30 Minuten vorher angelegt werden. Nach dem Duschen / Baden sollte das Tape abgetupft werden oder auf niedriger Stufe trocken geföhnt werden. Es kann gelegentlich zu Hautirritationen kommen. In diesem Fall umgehend das Tape entfernen. Das Tape lässt sich am besten nach dem Duschen / Baden entfernen.

Sicherheitshinweise:

Bei Allergie gegen einen der Inhaltsstoffe Tape nicht verwenden oder zunächst an einer kleinen Hautstelle testen. Nicht auf offene Wunden und Hautverletzungen kleben. Bei akuten und chronischen Hauterkrankungen (z.B. Neurodermitis im Schub, Psoriasis, Pilzinfektionen) nicht verwenden. Bei Thrombose, Thrombophlebitis nicht verwenden. Bei einer pAVK distal vom Verschluss nicht verwenden. Bei malignen Tumoren, Bestrahlung, Chemotherapie nicht verwenden. Schwangere sollten nur nach Rücksprache mit dem behandelnden Arzt das Tape anlegen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Anwendungsdauer: Das Tape hält bis zu 6 Tagen auf der Haut.

Technische Daten:

Kinesiologisches Tape mit Zusatznutzen.

Trägermaterial: 95% Baumwolle, 5% Elasthan.

Klebmasse: basiert auf Synthetikgummi.

Inhaltsstoffe: Arnica montana 10⁻⁶, Rhus toxicodendron 10⁻⁸ und Ruta graveolens 10⁻⁶.

Kühl, trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt zwischen 5°C und 25°C lagern.

Sortimentübersicht:

AT 20101	Hellblau	(5 cm x 5 m)	AT 20102	Pink	(5 cm x 5 m)
AT 20103	Schwarz	(5 cm x 5 m)	AT 20104	Beige	(5 cm x 5 m)
AT 20105	Grün	(5 cm x 5 m)	AT 20106	Marineblau	(5 cm x 5 m)

CE: Konform gemäß EU Richtlinie 93/42/EWG für Medizinprodukte

Produktion: EU

Stand: 03/2017